



Utilisation **obligatoire** du tube de purge avant un tube d'hémostase (bleu clair) lors d'un prélèvement avec épicrotine.

Tubes Neutres sans additif

Tubes neutres sans additif pour purge et/ou tube secondaire. Bouchon sécurité BD Hemogard™ transparent.
Tube en PET. Format 13*75. Vide 3 ml.
Sérigraphie.



Ordre de prélèvement Recommandations CLSI GP41-A7 et GFHT 2015 (www.geht.org)

Avec une aiguille (ponction franche)



Citrate



SST™



CAT



Barricor™



PST™



LH



EDTA



Glucose



Autres

Avec une unité à ailettes



Flacon
aérobie



Flacon
anaérobie

• Avec hémoculture



Citrate



SST™



CAT



Barricor™



PST™



LH



EDTA



Glucose



Autres

• Sans hémoculture



Tube neutre
(sans additif)



Citrate



SST™



CAT



Barricor™



PST™



LH



EDTA



Glucose



Autres

(Image issue du document "Ordre de prélèvement Tubes" du site BD accreditworld - Mise à jour : mai 2017-. Recommandations CLSI, GP41-A7, 2017 et GEHT 2015)

Respecter l'ordre de prélèvement des tubes ainsi que "IE-C1-LBM-006-Notice simplifiée : Prélèvements biologiques"

Eliminer le tube de purge prélevé et transmettre les autres tubes au laboratoire.