



1. Objet

- Instruction également applicable sur le site d'Aix-Les-Bains
- Dépistage du diabète gestationnel par épreuve d'hyperglycémie par voie orale (recommandé entre 24 et 28 SA)

2. Conditions

- A jeun de 12h (sans boire, ni fumer, ni manger)
- La patiente doit être et rester à jeun pendant la durée du test.
- Si la patiente vomit pendant l'épreuve, l'épreuve est annulée.
La glycémie à jeun reste interprétable. Dans ce cas modifier le dossier DxLab en remplaçant HGPO grossesse par Glycémie à jeun.

3. Matériel

- Minuteur ou chronomètre
- Glucorange® (75 g) ou Glucocitron® (75 g) (stockés dans le réfrigérateur de l'infirmerie MA 101 pour le secteur externe du laboratoire)
- Pour le laboratoire d'Aix les Bains, Glucorange® (75 g) ou Glucocitron® (75 g) (stockés dans le réfrigérateur de la salle de détente pour le secteur externe du laboratoire)

4. Mode opératoire

- Prélever un tube avec antiglycolytique (tube bouchon gris) à jeun : glycémie à **T0** selon le mode opératoire en vigueur MO-C1-LBM-021-Ponction veineuse
- Faire absorber un flacon de Glucorange® (75 g) ou Glucocitron® (75 g), de préférence à la paille
- Déclencher le minuteur
- Prélever un tube avec antiglycolytique (tube gris) 1 heure après l'ingestion : **T1**
- Prélever un tube avec antiglycolytique (tube gris) 2 heures après l'ingestion : **T2**
- Il est possible d'allonger la patiente dans la salle d'attente sur le transat à disposition. Possibilité d'installer un paravent pour son confort.