



1. Conditions

Le prélèvement est fait, si possible au moins 2 h après la miction précédente (Remic 2010)

2. Matériel

- Plateau contenant des compresses imbibées :
 1. de savon,
 2. d'eau stérile
 3. et de Dakin
- Kit urine bactériologie avec dispositif de transfert :
 1. Flacon bouchon bleu 
 2. Tube bouchon « vert olive » 

3. Mode opératoire

- Réaliser une hygiène des mains selon le mode opératoire en vigueur MO-G7-LBM-004-Mains : Hygiène
- Préparer le plateau cf. Matériel et le donner au patient
- Remplir avec le patient la fiche de renseignements cliniques dédiée
- Expliquer au patient la démarche à suivre, il doit :
 - Se laver soigneusement les mains
 - Faire une toilette intime à l'aide des compresses préalablement préparées en respectant l'ordre indiqué ci-dessus
 - Ouvrir le flacon stérile **sans toucher l'intérieur du flacon et du bouchon**
 - Eliminer le 1er jet d'urine dans les toilettes
 - Recueillir le milieu du jet dans le flacon
 - Fermer hermétiquement le flacon et le déposer dans le plateau
- Mettre des gants
- Récupérer le prélèvement, le transvaser dans le tube grâce au dispositif de transfert et étiqueter.

